

Carry Gaia 1.7

Ultra Selective MicroCatheter



株式会社 ユー・ティー・エム

Carry Gaia 1.7

キャリー ガイア


血管内処置診断用マイクロカテーテル

「より末梢に…」をキーワードに


Ultra Selective TACEを想定したシャフト設計で術者をサポートします。

Selective 1.6Fr/1.7Fr/2.7Fr

品番	外径			最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	柔軟長	マーカ―数	最大適合 ガイドワイヤ径	先端形状
	先端チップ部	先端部	手元部							
ES1727-110	1.6Fr	1.7Fr	2.7Fr	0.0157"	0.023"	110cm	45cm	1	0.014"	ストレート
ES1727-130						130cm				
ES1727-150						150cm				
ES1727-110-45A	1.6Fr	1.7Fr	2.7Fr	0.0157"	0.023"	110cm	45cm	1	0.014"	45° アングル
ES1727-130-45A						130cm				
ES1727-150-45A						150cm				

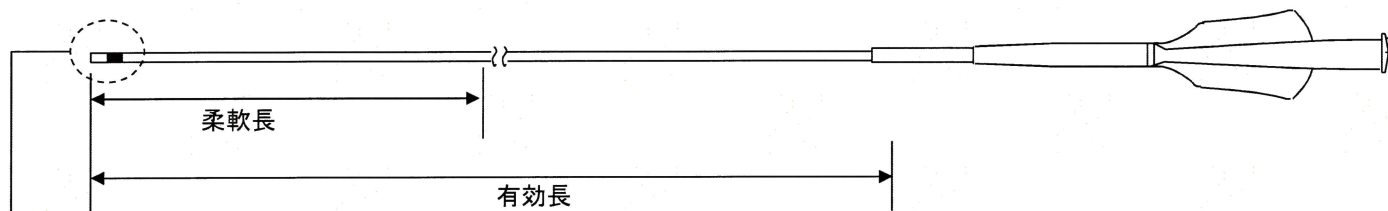

先端拡大写真

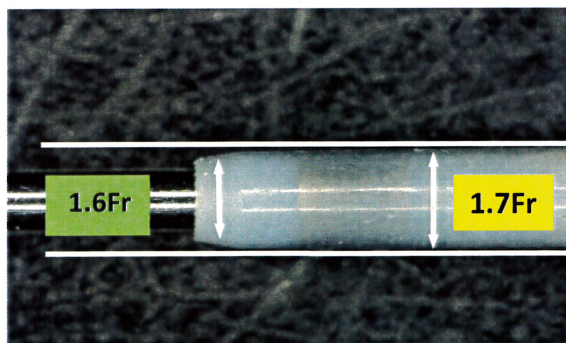

流量データ(単位 ml/s)

有効長	造影剤	4.140kpa (600psi)	5.520kpa (800psi)	6.900kpa (1000psi)
110cm	イオパミドール 300	1.2	1.9	2.4
	" 370	0.8	1.3	1.7
130cm	" 300	0.9	1.6	2.0
	" 370	0.5	1.0	1.4
150cm	" 300	0.7	1.2	1.6
	" 370	0.4	0.8	1.1

※試験条件: 造影剤37°C加温 装置: ゾーンマスターSR(シーマン社)
 ※造影剤の粘度、他諸条件の変動により、実験値を下回る場合があります。

※先端形状アングルタイプ各種も取り揃えております。

※上記以外の品番、付属品の有無につきましては弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

※製品改良の為、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。

※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

販売名: キャリー

一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル

医療機器承認番号: 21600BZZ00598000

高度管理医療機器

保険医療材料請求分類: マイクロカテ・OSB

U&M 株式会社 ユー・ティー・エム

〒463-0037

愛知県名古屋守山区天子田3丁目901

TEL 052-726-8400 FAX 052-726-8401

本社/〒440-0858

愛知県豊橋市つつじが丘2丁目16-3

TEL 0532-63-4326 FAX 0532-61-1134

http://www.utm-m.co.jp